

Übernahme der Daten von WTS 7

Wiener Testsystem
Ab Version 8.8



SCHUHFRIED

passion for psychology

1 EINLEITUNG

In dieser Anleitung wird beschrieben wie Sie die mit dem „Wiener Testsystem 7“ erhobenen Daten in ein „Wiener Testsystem 8“ übernehmen können. Falls die erhobenen Daten des WTS 7 **nicht benötigt werden**, können Sie diese Anleitung übergehen und direkt mit der WTS 8 Installation fortsetzen. Beide Wiener Testsystem Versionen können parallel auf einem PC installiert sein.

WICHTIG:

Vor der gewünschten Übernahme der mit WTS 7 erhobenen Daten **müssen** Sie ein Update des WTS 7 Systems auf die Version 7.3.20 (ist in der Lieferung enthalten) durchführen, Führen Sie **vor dem Update** ein Backup Ihrer Datenbank durch. Wie Sie für ein Backup vorgehen finden Sie im Abschnitt 5.


ACHTUNG:

- Führen Sie das Update **vor der Installation des WTS 8 durch!**
- Daten aus dem WTS 6 können **nicht übernommen werden!**


2 BEREITSTELLEN DER DATEN AUS WTS 7

Im ersten Schritt muss Ihr bestehendes WTS 7 auf den neuesten Stand gebracht werden. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

1. Legen Sie die DVD mit der neuesten WTS 7 Version (7.3.2) ein und führen Sie das Update durch. Dazu benötigen Sie Ihren „**Aktivierungs-Code**“. Diesen finden Sie auf der DVD im Ordner „**License**“.
2. Starten Sie das WTS 7 ein und markieren Sie alle Ergebnisse, die Sie ins WTS 8 übernehmen wollen. Um sämtliche Daten zu markieren können Sie das Kontrollkästchen im Kopf der Tabelle anwählen (siehe unten). Stellen Sie sicher, dass in diesem Fall kein Filter eingestellt ist. Dies ist der Fall, wenn die Schaltfläche „Kein Filter“ inaktiv ist.

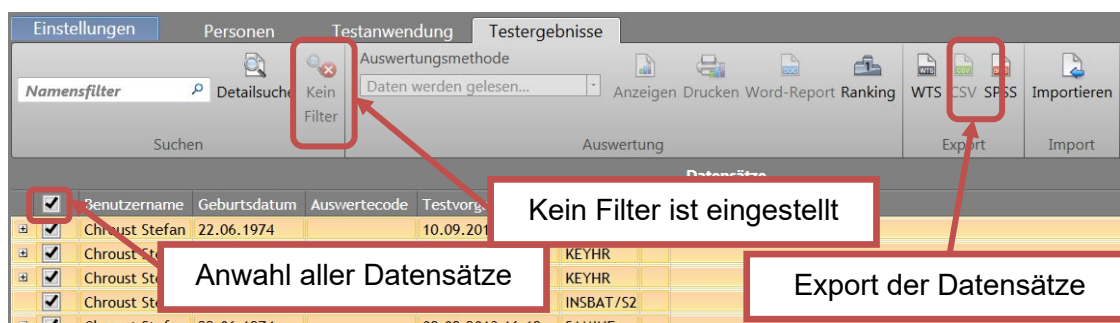

3. Exportieren Sie die markierten Ergebnisse über die Schaltfläche „**WTS**“ in der Rubrik „Export“. Nach dem Klicken dieser Schaltfläche öffnet sich ein Dialog, in dem Sie den Speicherort und den Namen der Exportdatei definieren können. Die Datei hat den Dateityp „xstp“. **Alle exportierten Ergebnisse werden in dieser Datei zusammengefasst.** Die **Personendaten, der exportierten Ergebnisse**, werden selbstverständlich übernommen. Ein zusätzlicher Export dieser Personen ist daher nicht notwendig.

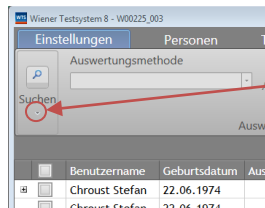

Öffnen der Filter-
einstellungen


Falls Ihre Bildschirmauflösung zu klein ist, kann es sein, dass das Filter der Ergebnisse nicht dargestellt wird. Um den Filter darstellen zu können klicken Sie bitte auf den kleinen Pfeil unterhalb.

3 INSTALLATION VON WTS 8

Installieren Sie nun Ihr Wiener Testsystem 8, gehen Sie dafür laut mitgelieferter Installationsanleitung vor.

4 IMPORTIEREN DER DATEN INS WTS 8

1. Nach erfolgreicher Installation des WTS 8 klicken Sie im WTS 8 auf den Karteireiter „Testergebnisse“ und dann auf „Importieren“ in der Rubrik „Import“. Es öffnet sich ein Dialog, in dem Sie die zuvor exportierte Datei vom Dateityp „xstp“ auswählen können. Mit einem Klick auf Öffnen starten Sie den Datenimport.
2. Die zuvor exportierten Ergebnisse inklusive der Personendaten sind nun im Wiener Testsystem 8 verfügbar!

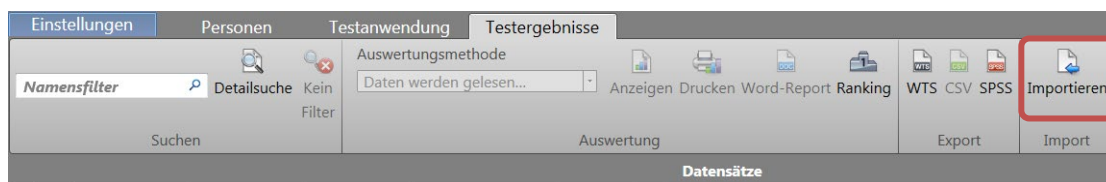


Im Anschluss können Sie WTS 7 und die dazugehörige Vienna Testsystem Legacy Software deinstallieren.

5 DURCHFÜHREN EINES BACKUPS IM WTS 7

Wechseln Sie in die „Einstellungen“ und gehen unter „Allgemeine Einstellungen → Datenbank“. Klicken Sie dort die Schaltfläche „Sicherung starten“.

Damit wird eine Datei „wtsnx.bak“ im Verzeichnis „C:\Programme\Microsoft SQL Server\MSSQL10_50.WTSNXEXPRESS\MSSQL\BACKUP\“ angelegt (kopieren Sie diese Datei nach Bedarf in ein Verzeichnis Ihrer Wahl zur Sicherung).

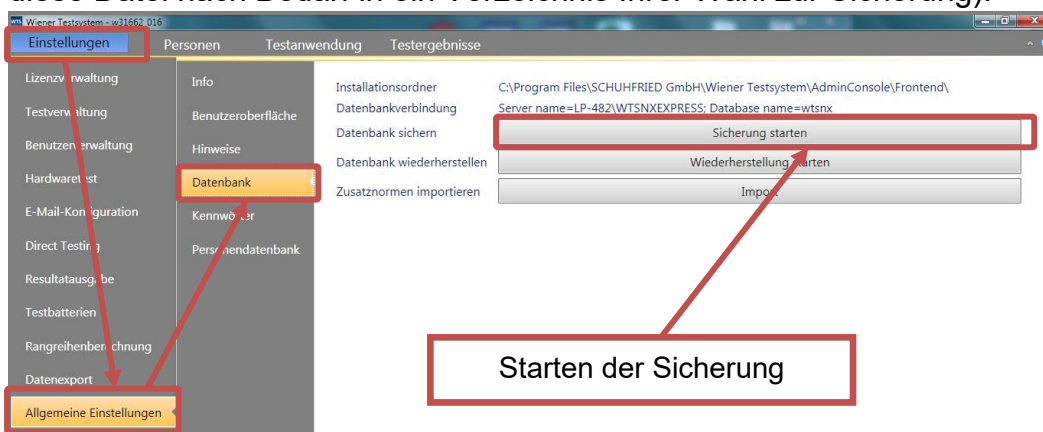

Starten der Sicherung

Psychometrische Tests

WIENER TESTSYSTEM

Kognitive Trainings

COGNIPLUS

Multimediales Biofeedback

BIOFEEDBACK Xpert

SCHUHFRIED

SCHUHFRIED GmbH

**Hyrtlstraße 45
2340 Mödling
Österreich**

Telefon +43 2236 42315

Fax +43 2236 46597

E-Mail info@schuhfried.com

www.schuhfried.com/de



etpg
european test publishers
group



ISO 13485 M-138